


영남대학교 자동심장충격기(AED) 위치 안내도

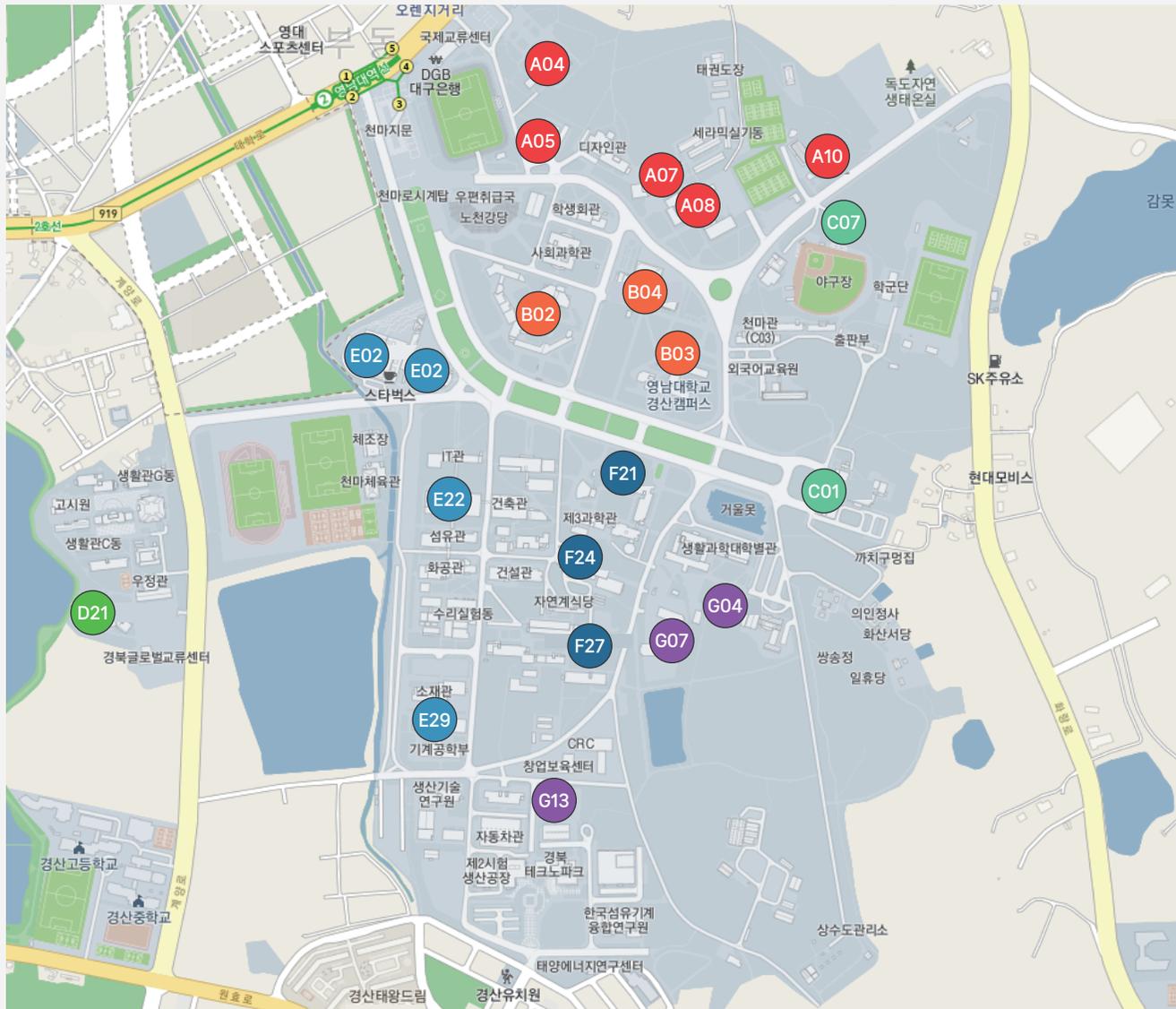

- A04** 박물관 - 1층 안내데스크 옆
- A05** 학생지원센터 - 1층 건강관리센터 내
- A07** 예술대학 미술관 - 1층 북편 현관
- A08** 사범대학 - 1층 동편 로비
- A10** 예술대학 음악관 - 1층 로비
- B02** 상경관 - 1층 남편 현관
- B03** 인문관 - 1층 복사실 옆
- B04** 중앙도서관 - 1층 로비
- C01** 본부본관 - 1층 중앙 로비
- C07** 승리관 - 1층 현관
- D21** 향토관 - 1층 로비
- E02** 천마아트센터 대공연장 - 1층 안내데스크 옆
- E02** 천마아트센터 중강당동 - 1층 안내데스크 옆
- E22** 전기관 - 1층 서편 현관
- E29** 기계관 - 1층 로비
- F21** 제1과학관 - 1층 중앙 로비
- F24** 과학도서관 - 2층 로비
- F27** 생명응용과학대학 본관 - 1층 중앙 로비
- G04** 법학전문대학원 - 1층 동편 로비
- G07** 약학관 - 1층 로비
- G13** 로봇관 - 1층 중앙 로비

자동심장충격기(AED) 사용방법

전원켜기

패드부착

심장리듬분석

심장충격(제세동)

반복



자동심장충격기(AED)를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓은 뒤에 전원 버튼을 눌러 전원을 켜다.



패드를 부착부위에 정확히 부착한다.
 · 패드1: 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 부착
 · 패드2: 왼쪽 젖꼭지 옆 겨드랑이 부착

* 패드와 자동심장충격기 본체가 분리되어 있는 경우 연결하며, 패드 부착부위에 이물질이 있다면 제거한다.



"분석 중..."이라는 음성 지시가 나오면 심폐소생술을 멈추고 환자에게서 손을 뗐다.

* 자동심장충격이 필요 없는 경우 "환자의 상태를 확인하고, 심폐소생술을 계속 하십시오"라는 음성 지시가 나온다.



"쇼크 버튼을 누르십시오"라는 음성 지시가 나오면 점멸하고 있는 쇼크 버튼을 눌러 자동심장충격을 시행한다.

* 쇼크버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 환자에게 떨어져 있는지 확인하여야 한다.



자동심장충격을 시행한 뒤에는 가슴압박과 인공호흡을 30:2 비율로 심폐소생술을 다시 시행한다.

* 자동심장충격기는 2분마다 심장리듬 분석을 반복해서 시행하며, 자동심장충격기 사용과 심폐소생술 시행은 119 구급대가 현장에 도착할 때까지 지속되어야 한다.